

PLASMA

Teil 4: Wie funktioniert die Wundbehandlung mit Kaltplasma?

KALTPLASMA: Wie funktioniert die Wundbehandlung mit Kaltplasma?

So behandeln Sie Wunden mit dem plasma-care®-Gerät.

Koffer auf, Spacer drauf und los geht es. Ist es wirklich so einfach? Tatsächlich ist die Verwendung von plasma care® nicht kompliziert. Trotzdem gibt es Dinge, auf die Sie bei der Anwendung unbedingt achten müssen. So ist etwa die Vor- und Nachbehandlung der Wunde das A und O einer erfolgreichen Therapie. Damit keine Fragen offenbleiben, erklären wir für Sie die Wundversorgung mit dem Medizinprodukt Schritt für Schritt.

Wundbehandlung in 4 Schritten

Vorbereitung: Nehmen Sie den Verband ab und reinigen Sie die Wunde gründlich. Entfernen Sie totes Gewebe und Beläge. Führen Sie dazu ein der Wunde angemessenes Debridement durch.



Schritt 1: Schalten Sie das Handgerät über den Touch-Button ein.



Schritt 2: Befestigen Sie den Spacer: Gerät einfach in den Spacer drücken – Wenn es „klick“ macht, ist das Gerät eingesteckt.



Schritt 3: Jetzt platzieren Sie das Gerät mit dem Abstandhalter auf der Wunde - möglichst direkt auf der Haut.




Schritt 4: Sie starten die Plasmabehandlung, indem Sie erneut Touch-Button drücken. Halten Sie das Gerät in Position, nach 60 Sekunden stoppt das Gerät automatisch.

Abschluss der Behandlung: Sie können jetzt die Wunde verbinden.

Behandlung größerer Wunden

Bei größeren Wunden platzieren Sie das plasma-care®-Gerät erneut auf dem nächsten Wundareal und starten die Behandlung über den Touch-Button. **Insgesamt können Sie sechs Behandlungen innerhalb von 10 Minuten mit ein und demselben Spacer durchführen.** Während der Zeit wird das Gerät nicht ausgeschaltet.

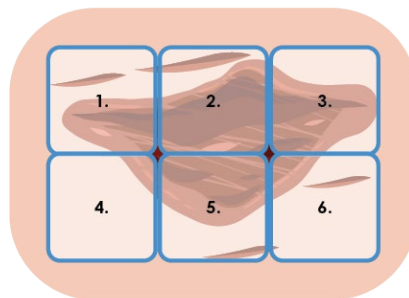

Speziell bei einer größeren Wunde sollten Sie die Wundbehandlung mit plasma care® gut planen. Wie teile ich die Wunde auf? Wo beginnt die Behandlung? Wo endet sie? Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass es keine Verzögerungen während der Therapie geben wird.

Behandlungszeit mit dem plasma care®

Jedes Wundareal sollte mindestens eine Minute, bei starker Kontamination bis zu drei Minuten behandelt werden.

Einsatz Antiseptikum

Sie können **nach der Behandlung** mit dem plasma care® die Wunde zusätzlich mit einem Antiseptikum behandeln. Das verlängert die bakterizide Wirkung. Der Einsatz des Antiseptikums kann jedoch bei verbesserter Wundsituation schon bald entfallen.

Einfach ansehen:

3-Minuten: <https://youtu.be/UXGcWxqC-NY>

Sie haben weitere Fragen?

Auf Wunsch erhalten Sie eine Einweisung. Unsere Service-Hotline 089 / 58805530 steht Ihnen Mo. – Do. von 8:30 bis 17:00 Uhr zur Verfügung, Fr. von 8:30 bis 15:00. Jeden Freitag um 13:00 Uhr finde eine Einweisungs-Sprechstunde statt.

Interessant?

Wer mehr wissen will, kann sich gerne an die Kaltplasma-Crew wenden. Wir klären und erklären. anfrage@terraplasma-medical.com.

So geht es weiter:

Teil 5 – Teil 5: Probieren Sie es selbst - Erprobung der Kaltplasmatherapie mit einem Leihgerät.

Ihr Erfahrungsbericht zählt.